

“葛瑞爾”主動回縮式翼型安全採血套組

Greiner VACUETTE EVOPROTECT SAFETY Blood Collection Set

衛部醫器輸字第 036908 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品型號及規格：

Item no.	型號	規格
450122	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length:19cm ,21G x 3/4"
450123	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length:30cm ,21G x 3/4"
450125	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length:19cm ,23G x 3/4"
450126	SAFETY Blood Collection Set + Holder	tubing length:30cm ,23G x 3/4"
450127	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length:19cm ,21G x 3/4"
450128	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length:30cm ,21G x 3/4"
450129	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length:19cm ,23G x 3/4"
450130	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length:30cm ,23G x 3/4"
450132	SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	tubing length:30cm ,25G x 3/4"

產品用途：

葛瑞爾主動回縮式翼型安全採血套組使用於靜脈血採集。本產品須由受過訓練之醫事人員依據說明書正確使用。

產品說明：

葛瑞爾主動回縮式翼型安全採血套組為單次使用、無菌、蝴蝶針頭，以一轉接頭連接可拆式管路設計，並具一個半自動安全釋放結構。蝴蝶針頭此一安全結構，使本產品可以單手操作，讓靜脈穿刺後可立即回收針頭，避免意外針刺而受傷的風險。

本產品可以多種形式併用。葛瑞爾主動回縮式翼型安全採血套組為無菌單一包裝，且可搭配轉接頭系統使用(如: HOLDEX)。

VACUETTE EVOPROTECT SAFETY Blood Collection Set + Holder	無菌單一包裝，立即可使用於血液採集
VACUETTE EVOPROTECT SAFETY Blood Collection Set + Luer Adapter	無菌單一包裝搭配轉接頭(如:用於連接標準採血管)

本產品不含天然乳膠或 DEHP 成分。

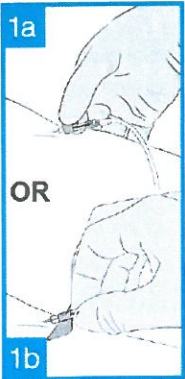
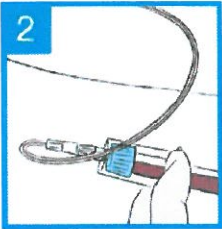
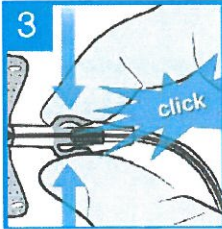
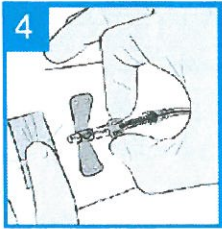
操作步驟：

1. 將本產品從包裝中取出。
2. 確認裝置是完好的。

注意：若本產品的個別包裝已被打開或動過，請換另一個新品。

血液採集

1. 選擇靜脈採血的位置，繫上止血帶並於採血處進行消毒。請勿觸摸消毒後的採血位置。
2. 選擇適當的採血管與葛瑞爾主動回縮式翼型安全採血套組，需要時接上適合的收集系統。
3. 小心的將安全蝴蝶針的保護套移除。
4. 手持蝴蝶針翼型部位或器材翼型後面主結構進行穿刺，讓病患的手臂向下進行靜脈採血，回血表示採血成功，視患者的血壓而定。
5. 如有需要，使用膠帶固定蝴蝶針。
6. 請按貴機構既有程序收集血液。管中一出現血液即鬆開止血帶。請以拇指壓住採血管固定住，以確保真空抽吸的效果。注意：第一支採血管抽得的血液量將因具彈性的導管的無效體積而抽不滿預計的量。建議先使用(無添加物的)拋棄採血管以確保後續採血管的抗凝劑及血液比。
7. 完成採血後，將紗布蓋住採集部位但不加壓。
8. 本產品啟動結構適用於靜脈。以單手按壓藍色釋放鈕以啟動安全裝置。小心不要妨礙針頭自動回縮的動作。
9. 安全裝置聽見「喀」的聲響即回縮完畢，並表示安全裝置已被啟動。
10. 請依照貴機構既有程序以紗布蓋住採集點並輕輕壓住。
11. 依據貴機構的規定及程序，將本產品丟棄到放置尖銳物的容器中。

血液採集: 靜脈內安全結構的啟動			
血液採集完成後，後續不需輸液時，建議即啟動安全裝置。			
			
<p>1a 或 1b. 手持蝴蝶針翼型部位或器材翼型後面主結構進行穿刺(讓病患的手臂向下進行靜脈採血)。注意不要擋到裝置的安全結構。回血表示採血成功，視患者的靜脈血壓而定。</p>	<p>2. 如有需要，使用膠帶固定蝴蝶針。請按貴機構既有程序收集血液。</p>	<p>3. 完成採血後，將紗布蓋住採集部位但不加壓。本產品啟動結構適用於靜脈。以單手按壓藍色釋放鈕以啟動安全裝置。小心不要妨礙針頭自動回縮的動作。安全裝置聽見「喀」的聲響即回縮完畢，並表示安全裝置已被啟動。</p>	<p>4. 請依照貴機構既有程序以紗布蓋住採集點並輕輕壓住。依據貴機構的規定及程序，將本產品丟棄到放置尖銳物的容器中。</p>

預防措施/注意事項：

1. 當根據使用說明書使用，本產品將達到預期的效能。
2. 避免不小心鬆開安全結構，或用力拉動翼型結構，否則會破壞本產品。





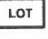
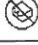


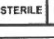

3. 使用前檢查本產品個別包裝。包裝有破損時請勿使用。
4. 任何使用過的針頭皆視為具生物感染性。請丟棄使用過的所有器具於被核准的生物污染收集盒。
5. 安全結構啟動後請勿再用力鬆開或重啟。
6. 在使用針頭期間和丟棄前，儘量將手放在針頭後方。
7. 建議在針頭仍在靜脈時啟動本產品安全結構，以避免血液或輸液的滴漏。
8. 請勿將本產品用於皮下灌輸或注射。
9. 依據貴機構的規定及程序，處理所有生物樣本和採血使用的尖銳物（採血針、針頭、魯爾轉接頭、採血套組）。
10. 任何暴露在生物檢體(例如:經由穿刺傷害)情況下的人必須接受適當的醫療照護，因為他們可能傳播人類免疫缺乏病毒(愛滋病)、病毒肝炎或其他傳染性疾病。
11. 請勿重複使用。重複使用可能造成有害的感染、受傷。
12. 在靜脈穿刺的過程中應隨時戴上防護手套，以降低暴露於危險物質的機會。
13. 採集被固定、血友病或癩癩患者等之血液檢體時須特別注意。
14. 因為針尖殘留血液造成的表面污染風險，可以在啟動安全結構後針尖朝上的方式丟棄針頭。
15. 請勿以黏性膠帶蓋住安全結構。
16. 衛生地更換配件，避免血液洩漏，並依據貴機構的規定及程序執行。

儲存方法：

儲存在 4-25°C (40-77°F)。

注意：避免陽光直射。若超過最高建議儲存溫度，可能會影響本產品品質。

標籤資訊

	製造業者		溫度限制
	保存期限		請勿重複使用
	批號		若包裝破損請勿使用
	型號		參見使用說明
	放射線滅菌		避免光照
Rx Only	遵醫囑使用		

文獻

CLSI GP41, 7th Edition Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens

原廠使用說明版本資訊

980274_R00_03-2019









製造業者名稱：Greiner Bio-One GmbH

製造業者地址：Bad Haller Straße 32, 4550 Kremsmünster, Austria

醫療器材商名稱：成信新貿易股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)

照片 - “葛瑞爾” 回縮式安全採血套組

<p>Item no. 450122</p> 	<p>Item no. 450127</p> 
<p>Item no. 450123</p> 	<p>Item no. 450128</p> 
<p>Item no. 450125</p> 	<p>Item no. 450129</p> 
<p>Item no. 450126</p> 	<p>Item no. 450130</p> 

照片 - “葛瑞爾” 回縮式安全採血套組

Item no. 450132

